

MEDCARE DESINFETANTE HOSPITALAR PRONTO USO



MED
CARE



Fig. 1

MEDCARE DESINFETANTE HOSPITALAR PRONTO USO é um poderoso limpador e desinfetante sem perfume indicado para superfícies ambientais e artigos não críticos de serviços de saúde.




É PRÁTICO COM RÁPIDA AÇÃO CONTRA BACTÉRIAS, FUNGOS E VÍRUS. SUA FÓRMULA POSSUI ATIVOS DE LIMPEZA E DE DESINFECÇÃO QUE SÃO CAPAZES DE LIMPAR, DESINFETAR E ALVEJAR.

MEDCARE DESINFETANTE HOSPITALAR PRONTO USO mata 99,9% dos germes, como bactérias*, fungos e vírus, incluindo da Covid-19 e é composto por peróxido de hidrogênio ativado e tensoativo. Possui ativos **BIODEGRADÁVEIS**.

Sua **AÇÃO 3 EM 1** proporciona limpeza, desinfecção e alvejamento em uma única etapa, economizando tempo, água e reduzindo custos operacionais.

Sua fórmula de **ALTO DESEMPENHO** tem eficácia comprovada e aprovada pela Anvisa. É exclusivo para serviços de saúde em geral.

MEDCARE DESINFETANTE HOSPITALAR PRONTO USO é bactericida, fungicida e virucida de rápida ação, com baixo tempo de contato (1 minuto). Não danifica as superfícies e artigos (dif. água sanitária) e não é nocivo ao usuário. Não é pH dependente não é inflamável (dif. álcool).

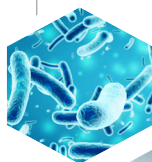

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS



ASPECTO
Líquido límpido



COR
Incolor




PH
2,3 a 2,9



COMPOSIÇÃO

◇ Peróxido de hidrogênio

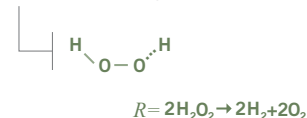

◇ Tensoativo não iônico
◇ Agente de controle de pH
◇ Sequestrante
◇ Água

EMBALAGEM



Frasco de
Polietileno
com 500ml



*Teste conduzido em laboratório por 1 minuto com: *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Pseudomonas aeruginosa*, SARS-CoV-2, *Escherichia coli*, *Trichophyton mentagrophytes* e *Candida albicans*.


MEDCARE DESINFETANTE HOSPITALAR PRONTO USO

**MED
CARE****PRO**

Fig. 2

MODO DE USO


HIGIENIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS:

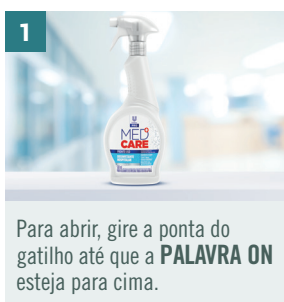

Para abrir, gire a ponta do gatilho até que a **PALAVRA ON** esteja para cima.



Aplique o produto sobre a **SUPERFÍCIE**.

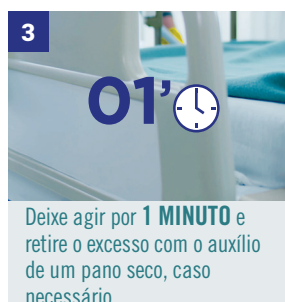

Deixe agir por **1 MINUTO** e retire o excesso com o auxílio de um pano seco, caso necessário.



PRECAUÇÕES DE USO

CUIDADO!
ANTES DE USAR,
LEIA AS
INSTRUÇÕES
DO RÓTULO.

ATENÇÃO! CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração. Evite o contato com a pele. Depois de utilizar este produto, remova as luvas, lave e seque as mãos. Não misturar com outros produtos. Não reutilizar a embalagem para outros fins. Usar luvas para sua aplicação. Usar máscaras para sua aplicação. Não utilizar para desinfecção de alimentos e água para consumo humano. Não aplicar sobre pessoas, alimentos e animais.

PRIMEIROS SOCORROS

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS E PELE, LAVAR IMEDIATAMENTE COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA DURANTE 15 MINUTOS. SE A IRRITAÇÃO PERSISTIR CONSULTE O CENTRO DE INTOXICAÇÕES OU UM MÉDICO, LEVANDO A EMBALAGEM OU O RÓTULO DO PRODUTO. EM CASO DE INGESTÃO ACIDENTAL, NÃO INDUZIR O VÔMITO. CONSULTE O CENTRO DE INTOXICAÇÕES OU UM MÉDICO IMEDIATAMENTE, LEVANDO A EMBALAGEM OU O RÓTULO DO PRODUTO. **EMERGÊNCIAS TOXICOLÓGICAS: 0800-701-0450**

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

IMPORTANTE conservar a embalagem fechada em lugar fresco, ao abrigo de luz solar direta e do calor. Antes da aplicação recomendamos que o produto seja testado em uma pequena área não visível. **NÃO APLICAR O PRODUTO SOBRE SUPERFÍCIES POROSAS COMO MADEIRA PERMEÁVEL OU EM LINÓLEOS.** Enxague imediatamente após o uso direto em metais pintados, alumínio anodizado, piso vinílico e porcelanato. Evite o uso direto em superfícies de mármore e em rejunte de azulejos.



ÁGUA PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.



Atendimento ao consumidor. Ligue grátis: 0800 707 1103



Central de Intoxicação 0800 701 0450

unileverpro.com.br